


# CÁNULA VAMA

## Intubación Fibroscópica de Precisión

**Innovación,  
seguridad  
y precisión**  
en la intubación.



La **Cánula VAMA** está diseñada para facilitar la intubación guiada por fibroscopio, proporcionando un procedimiento más seguro y eficiente para pacientes con anestesia o despiertos. Su diseño innovador mejora la precisión y el confort del médico.

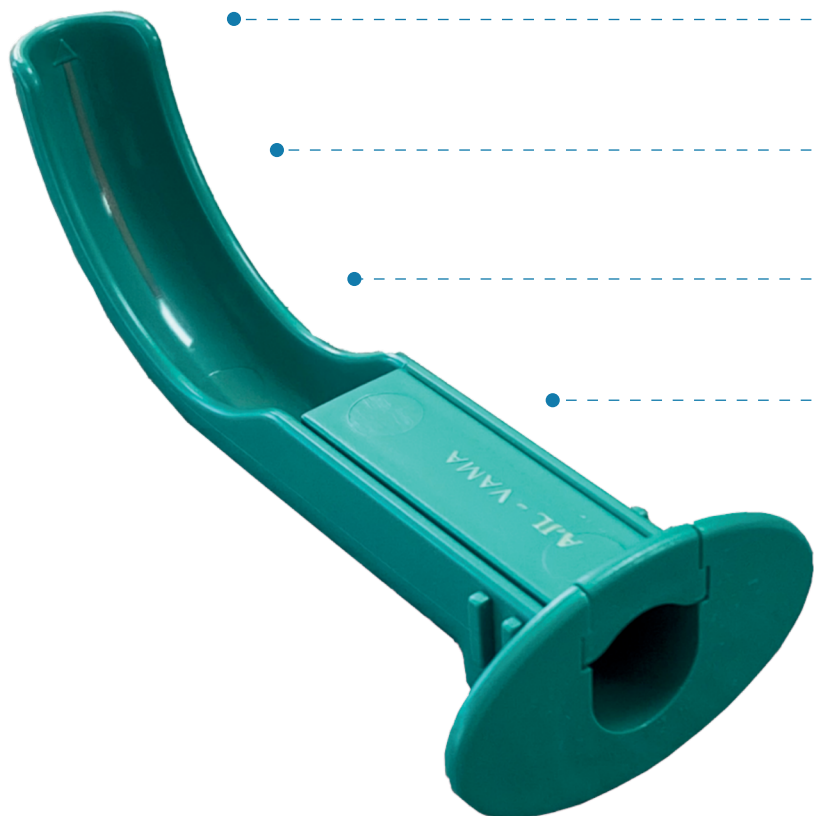

## Libre de látex

Reduce el riesgo de alergias.

## Forma anatómica

Facilita la inserción y extracción.

## Guía Interna

Mejora la precisión en la intubación.

## Apertura deslizante

Permite una extracción segura sin retirar el tubo endotraqueal.

Longitud: 10.6 cm

Diámetro interno: 1.7 cm

Alto: 4.2 cm

Uso adulto, desechable.  
No estéril.

Procedimiento  
rápido y seguro.

Facilita la introducción  
del fibroscopio.

Optimiza la comodidad del  
paciente y el médico.



## Paso 1

Introducción del fibroscopio con un tubo endotraqueal ya montado a través de la cánula VAMA.



## Paso 2

Fijar la cánula y desplazar el tubo endotraqueal hacia atrás. Con la mano dominante extraer la tapa deslizante.



## Paso 3

Desplazar el tubo endotraqueal hacia abajo y extraer la cánula VAMA de la boca siguiendo su curva natural.

Representante exclusivo:

**ENDOMED**  
Tecnologies S.A.C.

**Correo:** [ventas@endomed.com.pe](mailto:ventas@endomed.com.pe) / [endomedsac@gmail.com](mailto:endomedsac@gmail.com)

**Telefono:** (01) 368 - 7542

**Dirección:** Av los Álamos 309, Ubr Jose Olaya, San Juan de Miraflores

**Pagina Web:** [www.endomed.com.pe](http://www.endomed.com.pe)